

## Бинт Селокс в рулоне



Бинт Селокс из вискозного нетканого материала с гранулами Селокс с обеих сторон – основное средство для остановки угрожающих жизни кровотечений.

Для достижения 100 % гемостаза плотно затампонируйте раневую полость бинтом Селокс и давите в течение 3-5 минут.

### Бинт Селокс высокоэффективен при:

- сильных кровотечениях с высоким давлением;
- артериальных и венозных кровотечениях;
- огнестрельных, осколочных и ножевых ранениях;
- перевязке ран;
- остановки сильных кровотечений, вызванных открытыми переломами.

Бинт Селокс сохраняет свою структуру под давлением, что обеспечивает дополнительную абсорбцию жидкости и устойчивый гемостаз.


### ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ




Компактная, герметичная, стерильная и удобная в применении упаковка бинта Селокс позволяет эффективно и экономно использовать кровоостанавливающее средство.

### Как использовать

Начинается кровотечение

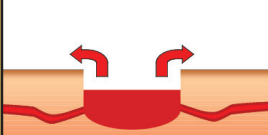


Этап 1: По возможности удалите кровь из раневой поверхности

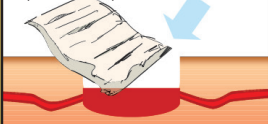

Этап 2: Плотно затампонируйте рану бинтом Селокс



Этап 3: Прижимайте в течение 3-х минут

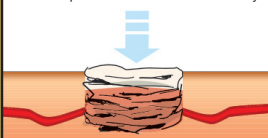

Этап 4: Наложите стерильную повязку по возможности



### Размеры упаковки

45 x 110 x 180 мм,  
размер бинта: 3000 x 75 мм  
8 г гранул Селокс  
на поверхности бинта

Останавливает КРОВОТЕЧЕНИЕ  
**СПАСАЕТ ЖИЗНЬ**